

FALLSTUDIE

Behandlung eines Hauteinriss mit Flaminal® Hydro

Rivash Sewnundun, Pflegefachkraft
Cardia Woonzorgcentrum Tabitha, Den Haag, Nederland

Behandlung eines Hauteinriss mit Flaminal® Hydro



PATIENTIN

- Weiblich
- 87 Jahre



HINTERGRUND

- Demenz
- COPD
- Schlaganfall (vor 25 Jahren)
- Chronische Niereninsuffizienz
- Bluthochdruck
- Claudicatio intermittens (arterielle Verschlusskrankheit)
- 15 Zigaretten täglich
- Hauteinriss aufgrund eines Sturz (vor 2 Wochen)

Behandlung eines Hauteinriss mit Flaminal® Hydro

20.04.



Lokalisation: Schienbein rechts

Wundgröße: 8 cm x 6 cm x 1 cm

Viel Exsudat, serös und blutig

Umgebungshaut intakt, ödematös, schmerzhaft

Wundschmerz 8 (VAS)

Keine Infektionszeichen

Behandlung

- Tag 1
 - Wundreinigung
 - Flaminal® Hydro
 - Abdeckung mit einer Salbenkompresse
 - Fixierung mit einer Binde
 - Verbandwechsel 3x pro Woche



Behandlung eines Hauteinriss mit Flaminal® Hydro



22.04. (Tag 3)

- Viel Exsudat, trüb, serofibrinös
- Wundumgebung ödematös, schmerzhaft
- Wundschmerz 7 (VAS)
- 7 x 5 x 0,5 cm

29.04. (Tag 9)

- Mäßig Exsudatmenge, serös, blutig
- Wundumgebung ödematös, schmerzhaft
- Wundschmerz 5 (VAS)
- 4,5 x 4 x 0,3 cm
- Lymphdrainage

06.05. (Tag 16)

- Mäßig Exsudatmenge
- Wundumgebung und Wundrand ödematös
- Wundschmerz 3 (VAS)
- 2,2 x 2,2 x 0,2 cm

13.05. (Tag 23)

- Wenig Exsudat
- Wundrand ödematös
- Nur Saugkomresse sensitive als Wundverband
- Wundschmerz 2 (VAS)
- 1,7 x 1,2 x 0,2 cm

18.05. (Tag 28)

- Wenig Exsudat
- Wundrand ödematös
- Wundschmerz 0 (VAS)
- 1,5 x 1,2 x 0,1 cm

➤ 4 Wochen

- Wunde komplett abgeheilt
- Schmerzfreie Behandlung